

WL-clean & WL-cid

BRUKSANVISNING



HYGIENRUTINER FÖR TURBINER, HAND- OCH VINKELSTYCKEN

HYGIENRUTINER FÖR TURBINER, HAND- OCH VINKELSTYCKEN

Under dagens gång:

Rengör vid behov för att avlägsna synlig smuts och blodrester. Desinficera mellan patienter med t.ex. Wet Wipes.

Vid slutet av dagen:

Alternativ 1: Automatisk rengöring med iCare. Använd iCare för automatisk rengöring, desinfektion samt smörjning av instrumenten.

Alternativ 2: Manuell rengöring med WL-clean/WL-cid

1. Avlägsna borr från instrumenten.
2. Rengör utsidan av instrumenten för att avlägsna synlig smuts och blodrester.
3. Torka av instrumenten och desinficera med ytdesinfektion, t.ex. Wet Wipes.
4. Invändig rengöring med WL-clean (flaska nummer 1):
 - a. Välj rätt adapter för respektive turbin, hand- eller vinkelstycke och sätt på den på flaskan.
 - b. Tryck fast instrumentet på adaptern.
 - c. **Spraya instrumentet ett par sekunder** tills att vätskan synligt går igenom till toppen av instrumentet.
 - d. Ta av instrumentet från adaptern och **låt rengöringsvätskan verka i 1 minut**
5. Invändig desinfektion med WL-cid (flaska nummer 2):
 - a. Välj rätt adapter för respektive turbin, hand- eller vinkelstycke och sätt på den på flaskan.
 - b. Tryck fast instrumentet på adaptern.
 - c. **Spraya instrumentet ett par sekunder** tills att vätskan synligt går igenom till toppen av instrumentet.
 - d. Ta av instrumentet från adaptern och **låt desinfektionsvätskan verka i 5 minuter**
6. Blås bort överflödig vätska med hjälp av luft från blästerspetsen på uniten eller ett munstycke för tryckluft.
7. **Avsluta med att smörja insidan med olja**, t.ex. med PANA SPRAY Plus.