

Unit Clean

BRUKSANVISNING



Rengöringssystemet för din veterinärunit
Enkelt - vetenskapligt - rent vatten

UNIT CLEAN - RENGÖRING 1 GÅNG/MÅNAD

För dig som har vattenflaska.

Unit Clean 1

Dag 1 efter arbetets slut

1. Skruva av vattenflaskan på uniten och töm den.
2. Fyll i vätska från Unit Clean 1 i vattenflaskan.
3. Skruva på flaskan.
4. Tryck på 3-vägssprutan, turbin osv. så att den färgade vätskan kommer ut ur instrumenten.
5. Låt vätskan stå kvar i instrumenten under natten.



Dag 2 före arbetets början

1. Skölj ur ev. kvarvarande vätska ur flaskan på uniten.
2. Fyll flaskan med rent vatten.
3. Tryck på 3-vägssprutan, turbinen etc. så att all färgad vätska försvinner ur uniten.
4. Börja arbeta med din unit.

Unit Clean 2

Dag 2 efter arbetets slut

Skruva av vattenflaskan på uniten och töm den.

1. Fyll i vätska från Unit Clean 2 i vattenflaskan.
2. Skruva på flaskan.
3. Tryck på 3-vägssprutan, turbin osv. så att den färgade vätskan kommer ut ur instrumenten.
4. Låt vätskan stå kvar i instrumenten under natten.



Dag 3 före arbetets början

1. Skölj ur ev. kvarvarande vätska ur flaskan på uniten.
2. Fyll flaskan med rent vatten.
3. Tryck på 3-vägssprutan, turbinen etc. så att all färgad vätska försvinner ur uniten.
4. Börja arbeta med din unit.

Ni kan nu arbeta med en ren unit i en hel månad.

UNIT CLEAN - RENGÖRING VID STARKT KONTAMINERAD UNIT

För dig som har vattenflaska.

Unit Clean P + buffert

Dag 1 efter arbetets slut

1. Skruva av vattenflaskan på uniten och töm den.
2. Blanda Unit Clean P med bufferten (lilla röret). Häll i den blandade vätskan i vattenflaskan.
3. Skruva på flaskan.
4. Tryck på 3-vägssprutan, turbin osv. så att den färgade vätskan kommer ut ur instrumenten.
5. Låt vätskan stå kvar i instrumenten under natten.

OBS! max 24 timmar.



Dag 2 före arbetets början

1. Skölj ur ev. kvarvarande vätska ur flaskan på uniten.
2. Fyll flaskan med rent vatten.
3. Tryck på 3-vägssprutan, turbinen etc. så att all färgad vätska försvinner ur uniten.
4. Börja arbeta med din unit.

Härefter skall rengöring med Unit Clean 1 och Unit Clean 2 genomföras 1 gång/månad.

Kontakta oss:

Accesia AB

Tel: 035-397 97

E-mail: info@accesia.se

www.accesia.se